

Guide de montage de la batterie de secours



1. Commencez par mettre le lit en position sortie.



2. Maintenant, vous devez ouvrir la boîte de contrôle. Utilisez un tournevis pour pousser dans le trou d'abord d'un côté des câbles, puis de l'autre côté des câbles.



3. Ouvrez la boîte de commande.



4. Placez la batterie de secours sous la boîte de commande. Assurez-vous que le câble tourne vers la droite, puis faites glisser la batterie de gauche à droite jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5. La batterie est ici montée sur la boîte de commande, et le câble tourne vers la droite.



6. Insérez le câble dans le trou vide de la boîte de commande comme indiqué.



7. Refermez la boîte de commande. La batterie de secours est maintenant montée.