

## Manuel d'entretien (lubrification du lit)

### Produits recommandés pour lubrifier RotoBed®



#### Graisse

Utilisez la graisse suivante ou un type similaire :

#### OKS 470 – White Universal High-Performance Grease

Description : Graisse universelle avec lubrifiants solides blancs et homologation NSF H2 - Lubrification de paliers lisses, paliers à roulement et paliers à rotule à sollicitations normales - Lubrification de pièces mobiles d'appareils de mécanique de précision - Lubrification lorsque des lubrifiants foncés ne sont pas utilisables - Résiste à l'eau.



#### Spray

Utilisez la spray téflon suivante ou un type similaire :

#### Würth HHS 2000 Lubricating Oil 500ml (spray)

Description : Huile semi-synthétique extrêmement résistante aux pressions élevées - Film lubrifiant extrêmement résistant au déchirement avec excellent amortissement des bruits et des vibrations - Excellente lubrification même dans les petits interstices - Protection fiable contre la corrosion - Résistant aux projections d'eau, à l'eau salée, aux acides et aux alcalins faibles - Sans silicone, sans résine et sans acide.

**Important !** N'exagérez pas la quantité de pulvérisation.



#### Tissu propre et sec

Utilisez un tissu propre et sec pour essuyer en cas d'excès de pulvérisation.

## Lubrification du dossier

Déplacez le dossier en position verticale. **Fixez le dossier** avant de commencer à retirer les boulons. Sinon, il tombera. Vous pouvez fixer la partie arrière en vous faisant aider par une autre personne qui la tient ou en attachant la partie arrière avec une sangle de transport.



1) Retirez les clips supérieurs.

2) Retirez le boulon.



3) Appliquez de la graisse (voir le boulon à droite).



4) Insérez à nouveau le boulon et les clips.



5) Suivez la même procédure avec le boulon à l'autre extrémité du moteur. Ne retirez pas les boulons aux deux extrémités en même temps.



## Lubrification du cadre

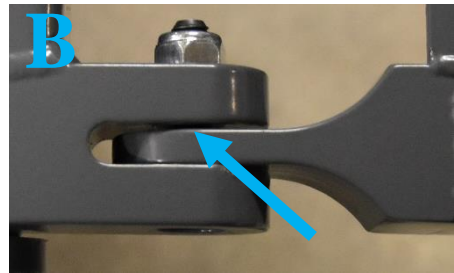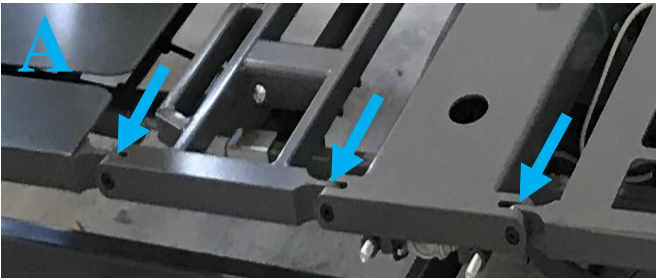


- 1) Toutes les pièces mobiles (A), où le cadre est connecté, doivent être pulvérisées avec du Téflon. Vaporiser dans les espaces entre les pièces métalliques (voir B).

**Important :** ne serrez pas trop les écrous / boulons (A) ; ils doivent être un peu lâche.

Répétez la procédure de l'autre côté du lit.



## Lubrification des points de montage du moteur de jambe

Relevez la partie jambe en position horizontale. Les deux boulons de connexion du moteur, **un à chaque extrémité**, doivent être desserrés.

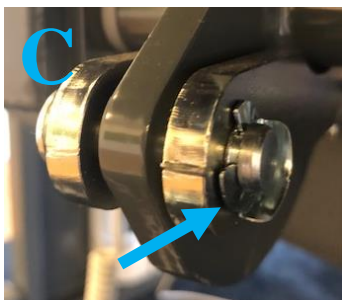


- 1) Retirez le clip de retenue arrière (voir photo C).
- 2) Retirez le boulon.
- 3) Appliquez de la graisse (voir photo D).
- 4) Insérez à nouveau le boulon et assurez-vous que le clip de retenue est fixé en place (voir photo E).
- 5) Suivez la même procédure avec le boulon à l'autre extrémité du moteur.

## Lubrification de la cartouche de gaz, du profil en U et des roues en nylon

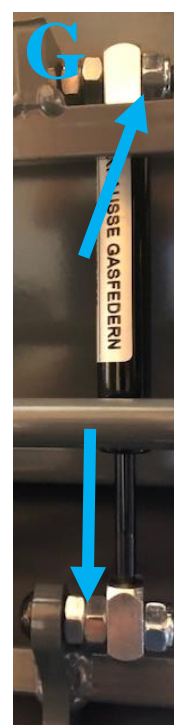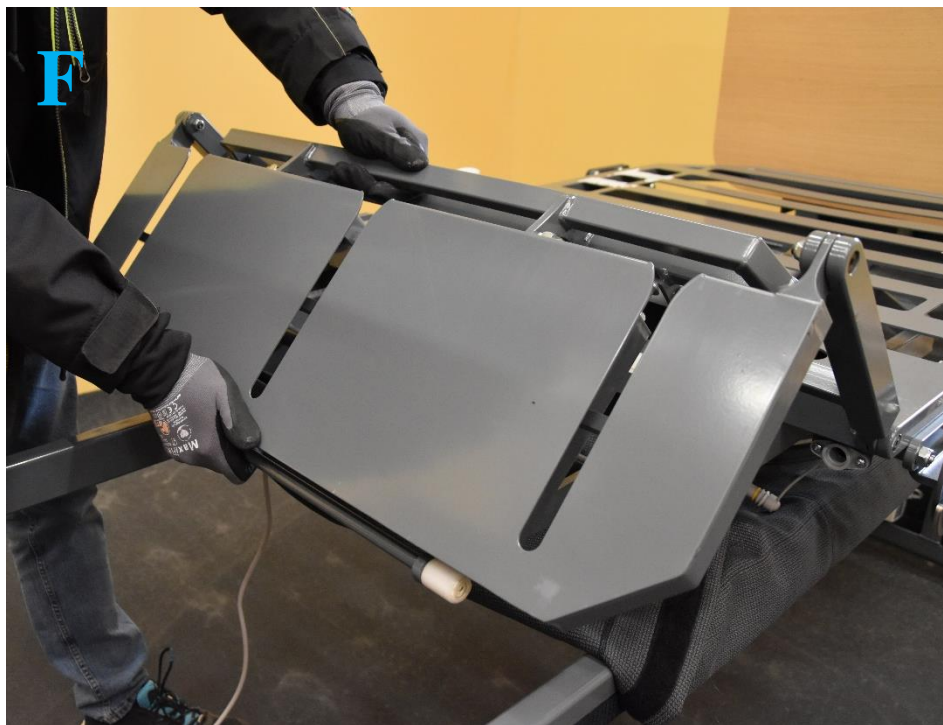

- 1) Retirez la partie jambe du profil en U (voir image F).
- 2) Vaporisez du Téflon sur les boulons aux deux extrémités de la cartouche de gaz (voir image G). Vaporiser entre les parties métalliques.
- 3) Suivez la même procédure à l'autre extrémité de la cartouche de gaz de l'autre côté du lit.

**Important :** Ne serrez pas trop les contre-écrous extérieurs (voir l'image G flèche du haut) car les supports des cartouches de gaz tournent sur les boulons.

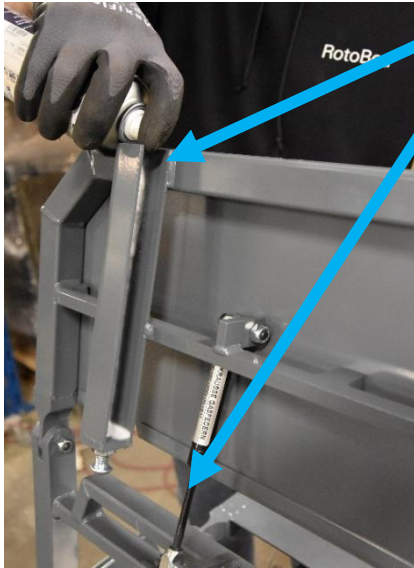


- 4) Vaporisez du Téflon dans le profil en U (sous la partie jambe) des deux côtés.
- 5) Vaporisez un peu sur le raidisseur fin de la cartouche de gaz. Faites de même sur la cartouche de gaz à l'autre extrémité.
- 6) Essuyez l'excès de spray avec un tissu propre et sec sur le profil en U ainsi que sur les raidisseurs fins.



- 7) Retirez les roues en nylon blanc de l'axe (voir photo H).
- 8) Appliquez un peu de graisse sur l'axe (voir photo I).
- 9) Remontez les roues en nylon (voir photo J).

## Lubrification de l'axe de la plaque du matelas du pied

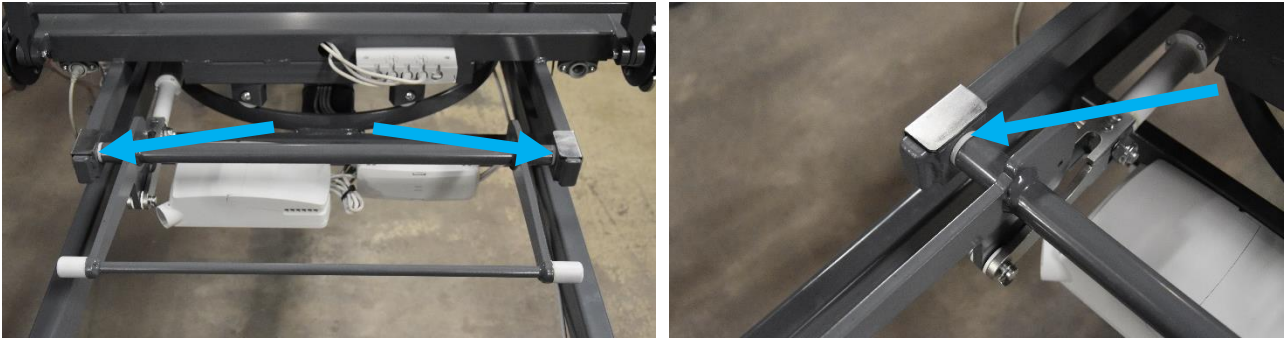

- 1) Vaporisez sur l'anneau blanc comme indiqué sur les deux images.
- 2) Répétez des deux côtés de l'axe.

## Lubrification de la plate-forme tournante

Tournez le lit en position de sortie pour un meilleur accès. Les cinq roues rotatives situées sous le siège doivent être pulvérisées à intervalles réguliers et au moins une fois par an.



- 1) Vaporisez les cinq passages de roue situés sur la plate-forme de rotation. Vaporisez dans la petite ouverture au-dessus et au-dessous de la tête de boulon sur les passages de roue comme indiqué sur les photos.