
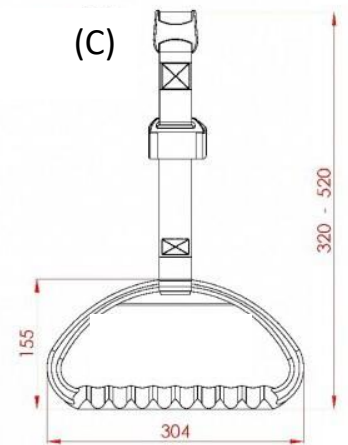
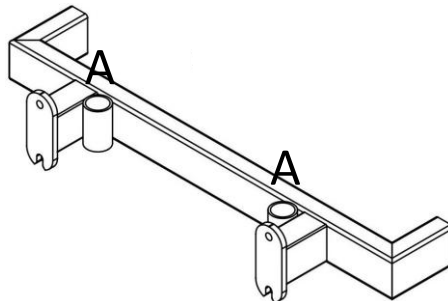


Notice d'utilisation Potence de lit

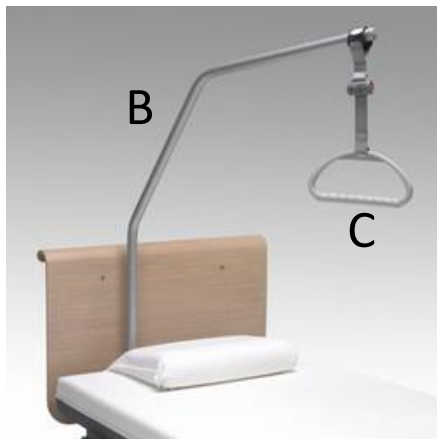


Le dispositif de maintien (A) pour la barre du potence de lit (B) est situé du côté de la tête de lit.

Placer le potence de lit dans son dispositif de maintien par le haut (côté droit ou gauche). Il est maintenu en hauteur par un boulon. Tournez la barre de sorte que le boulon se trouve dans l'une des encoches du dispositif de maintien. Une direction longitudinale ou transversale est possible. Accrochez la poignée (C) sur la barre avec la sangle entre les crochets.

Attention! La poignée et la sangle sont en plastique de haute qualité. Cependant, tous les plastiques ne résistent au vieillissement que dans une mesure limitée, de sorte que la poignée ou la courroie peuvent se casser ou se déchirer après une longue utilisation. Cela peut provoquer des blessures. Remplacez la poignée et la sangle au plus tard tous les 4 à 5 ans. L'année de fabrication est estampillée sur le produit.

Attention! La poignée et la sangle peuvent se casser ou se déchirer lorsqu'elles sont soumises à de lourdes charges et ainsi causer des blessures. N'utilisez pas de potence de lit à moins qu'il est chargé avec un maximum de 750 N (environ 75 kg).

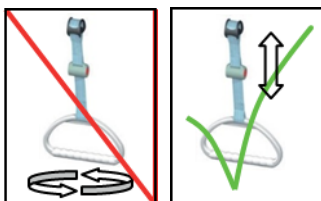

Attention!

Pendant l'utilisation habituelle et dans un état accroché, la poignée ne doit pas être accroché, la poignée ne doit pas être tournée plusieurs fois jusqu'à ce que la sangle sera tournée autour de son axe vertical (► 180°). Ceci peut mener à une détérioration de l'enrouleur.