


La télécommande peut également être connectée à la fois sur le côté droit et gauche du lit.

Pour faire fonctionner le lit, maintenez une touche enfoncée. Lorsque vous relâchez la clé, le mouvement s'arrête.

Appuyez uniquement sur deux touches simultanément lorsque vous souhaitez reprogrammer le lit. Lorsque la télécommande n'est pas utilisée, suspendez-la sur la barrière de lit.

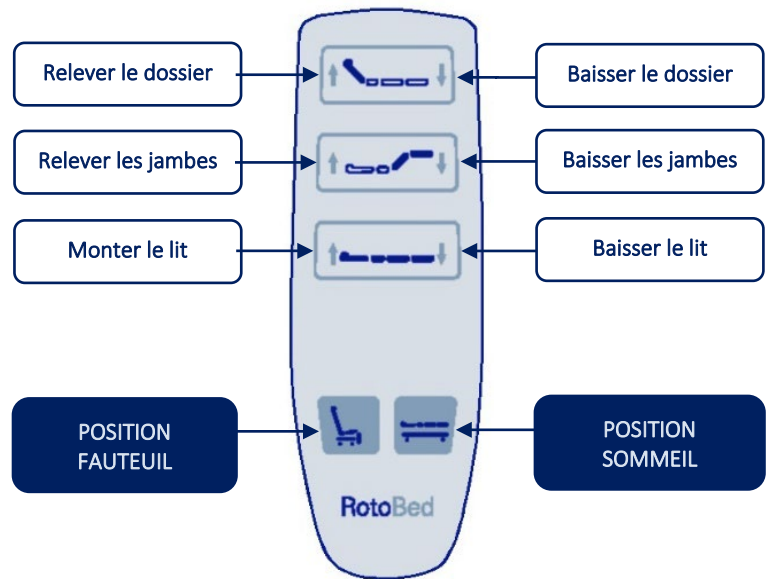

**ASTUCE :** Vous pouvez soulager la pression sur les talons en soulevant légèrement la partie jambe. Ainsi, la pression sera répartie sur les muscles de vos mollets et vos talons seront soulevés du matelas.

## Entrée



Pour un meilleur confort, installez-vous le plus près possible du dossier. La hauteur de sortie standard sans matelas est de 32 cm au-dessus du sol. La hauteur de sortie optimale est lorsque toute la surface du pied repose sur le sol sans supporter le poids de vos jambes. Utilisez les touches de hauteur de lit pour trouver votre hauteur préférée.



Mémo-risez la hauteur de sortie en appuyant simultanément sur les deux touches de hauteur du lit pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Le lit se déplacera alors automatiquement à la hauteur mémorisée chaque fois que la touche **POSITION DU FAUTEUIL** est activée.

## Inclinaison du dossier



Il est important que vous soyez confortablement assis sans pression sur la région abdominale pendant que le lit tourne. L'inclinaison standard du dossier à la livraison du lit est de 45°. L'inclinaison peut être réglée sur un angle de 35° à 65°. En dehors de cette plage, le lit déclenchera une alarme. Déplacez le dossier à votre inclinaison préférée lors de la rotation. Mémo-risez l'inclinaison comme suit :



Appuyez simultanément sur les deux touches du dossier pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Votre inclinaison préférée est maintenant enregistrée et le lit se déplacera toujours vers cette inclinaison lors de la rotation.

## Sortie



Appuyez sur la touche **POSITION DU FAUTEUIL** jusqu'à ce que le lit s'arrête en position de sortie. Lorsque le mouvement s'arrête, vous pouvez relâcher la touche puis appuyer sur "Relever le dossier" pour que le dossier avance un peu plus. Ensuite, vous pouvez utiliser la touche « Monter le lit » pour déplacer le lit en hauteur. Cela facilite la sortie.



Pour une sortie perpendiculaire, appuyez sur les deux touches **POSITION** pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.


L'angle de sortie est oblique en standard pour faciliter la transition vers un fauteuil roulant ou un déambulateur.

## Montage de barrières de lit

RotoBed®Change peut être livré avec des barrières en métal ou en placage de chêne. Quel que soit le matériel, les barrières de lit sont montées et retirées de la même manière :



Support pour barrière de lit avec serrure

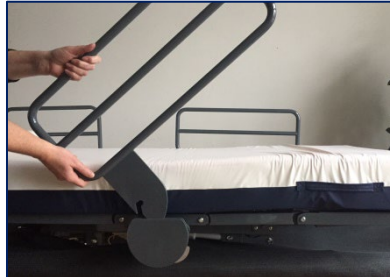

Barrière de lit retirée du support




Barrière de lit remontée dans le support

Appuyez sur le petit loqué en dessous tout en soulevant la barrière de lit. La barrière de lit peut tout simplement être remise en place, elle se reverrouillera automatiquement.

**NB :** Les barrières de lit doivent être montées ou retirées. Ne les laissez pas à la verticale dans les supports. Cela peut entraîner un risque de pincement et endommager le lit pendant la rotation.

## Montage du matelas

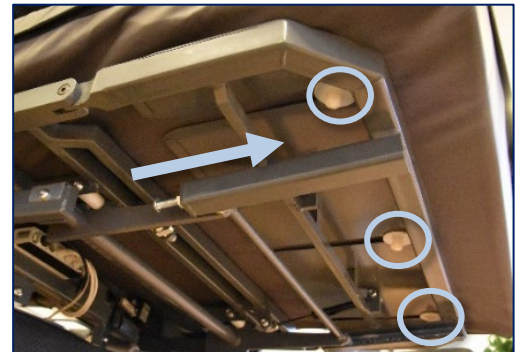

Mettez le lit en position fauteuil, puis mettez la partie pied dans la position la plus haute possible à l'aide de la télécommande. Pliez le matelas au milieu et placez-le de manière que les trois disques inférieurs soient placés à l'ouverture des trois trous de la partie jambe. Il est important qu'il y ait un disque en nylon sur le dessus et le dessous de la plaque métallique. Tirez ensuite le matelas vers le pied de manière que les trois disques glissent jusqu'au fond des trous. Mettez le plan de couchage complètement à l'horizontale à l'aide de la télécommande

Poussez le disque au milieu de la face inférieure du matelas principal dans le trou du plan de couchage. Il est important qu'il y ait un disque en nylon sur le dessus et le dessous de la plaque métallique. Ceci est assuré en appuyant sur le matelas principal tout en le tirant sur le côté. Les deux disques sur le matelas de pied sont enfoncés dans les deux trous ronds du plan de couchage de la partie pieds.

**Remarque:** RotoBed®Change ne doit pas être utilisé par des personnes sans introduction dans l'utilisation du lit. RotoBed®Change doit être utilisé exclusivement avec la télécommande. Le lit est testé selon les dernières normes et règles applicables pour les lits de soins. Sachez que ni les enfants ni les animaux ne sont sous le lit lorsque les pièces du lit sont fixées. Lorsque la jambe est soulevée, ne la surchargez pas d'objets lourds ou de personnes.