


Guide rapide pour RotoBed® Free





Veuillez scanner le code QR pour obtenir le manuel d'utilisation complet

RotoBed®
Rotate Life Better


Pour régler individuellement les fonctions du lit, par exemple relever le dossier, utilisez les flèches gauche/droite ←/→ pour sélectionner la fonction souhaitée. Utilisez ensuite les flèches haut/bas ↑/↓ pour ajuster le lit. Le mouvement s'arrête automatiquement lorsque vous relâchez la touche.

La touche **POSITION FAUTEUIL**  permet de faire pivoter le lit jusqu'à sa position de sortie, en conservant la hauteur et l'angle du lit rangé.

The key **POSITION SOMMEIL**  permet de faire pivoter le lit jusqu'à ce que la surface de couchage soit complètement horizontale.

La touche à stockage  permet d'enregistrer les positions favorites. Voir les instructions ci-dessous.


ASTUCE : Vous pouvez soulager la pression sur les talons en soulevant légèrement la partie jambe. Ainsi, la pression sera répartie sur les muscles de vos mollets et vos talons seront soulevés du matelas.

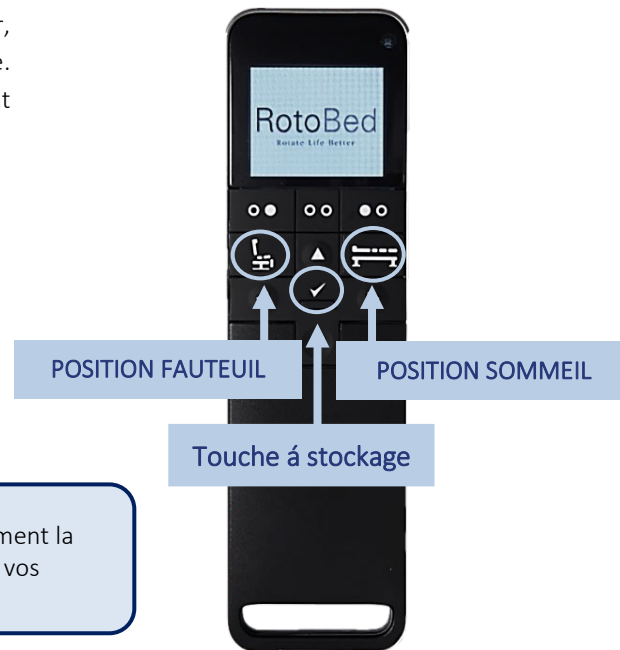

Entrée



Pour un meilleur confort, installez-vous le plus près possible du dossier. La hauteur de sortie standard sans matelas est de 32 cm au-dessus du sol. La hauteur de sortie optimale est lorsque toute la surface du pied repose sur le sol sans supporter le poids de vos jambes. Trouvez « HAUTEUR DU LIT » avec la flèche droite. Trouvez la hauteur de sortie souhaitée avec les flèches ↑/↓.

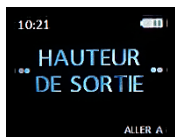


Cliquez sur la touche fléchée droite → 3 fois pour trouver HAUTEUR DE SORTIE. Appuyez sur la touche à stockage pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.



Le lit se déplacera alors automatiquement à la hauteur mémorisée chaque fois que la touche **POSITION DU FAUTEUIL** est activée.

Inclinaison du dossier

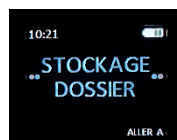

Il est important que vous soyez confortablement assis sans pression sur la région abdominale pendant que le lit tourne. L'inclinaison standard du dossier à la livraison du lit est de 45°. L'inclinaison peut être réglée sur un angle de 35° à 65°. En dehors de cette plage, le lit déclenchera une alarme. Allez à DOSSIER. Trouvez l'inclinaison souhaitée avec les touches fléchées ↑ / ↓.



Cliquez sur la flèche droite → 4 fois pour trouver STOCKAGE DOSSIER. Appuyez sur la touche Store  ou cocher  pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Votre inclinaison préférée est maintenant enregistrée et le lit se déplacera toujours vers cette inclinaison lors de la rotation.

Sortie



Appuyez sur la touche **POSITION DU FAUTEUIL** jusqu'à ce que le lit s'arrête en position de sortie. Lorsque le mouvement s'arrête, vous pouvez relâcher la touche puis appuyer à nouveau. Maintenant le dossier avancera un peu plus, après quoi le lit commencera à monter en hauteur. Cela vous aidera à vous mettre en position debout. Dès que la touche est relâchée, le mouvement s'arrête. En appuyant sur la touche **POSITION DE SOMMEIL** le lit reviendra en position de sortie et sera ainsi prêt pour la prochaine entrée.



Pour une sortie perpendiculaire, appuyez sur les deux touches **POSITION** pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.


RotoBed®

Montage de barrières de lit

RotoBed®Change peut être livré avec des barrières en métal ou en placage de chêne. Quel que soit le matériel, les barrières de lit sont montées et retirées de la même manière :



Support pour barrière de lit avec serrure

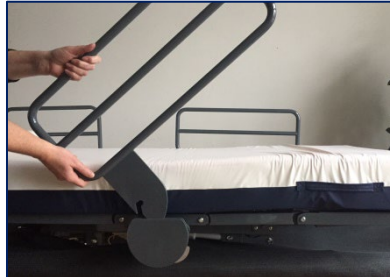

Barrière de lit retirée du support




Barrière de lit remontée dans le support

Appuyez sur le petit loqué en dessous tout en soulevant la barrière de lit. La barrière de lit peut tout simplement être remise en place, elle se reverrouillera automatiquement.

NB : Les barrières de lit doivent être montées ou retirées. Ne les laissez pas à la verticale dans les supports. Cela peut entraîner un risque de pincement et endommager le lit pendant la rotation.

Montage du matelas

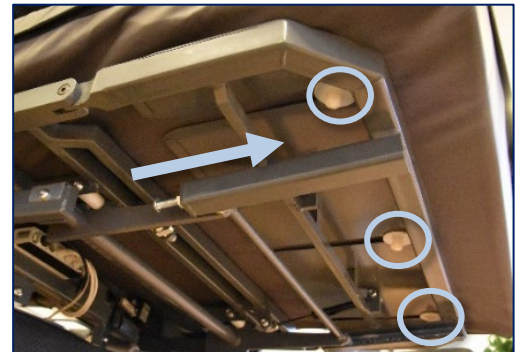

Mettez le lit en position fauteuil, puis mettez la partie pied dans la position la plus haute possible à l'aide de la télécommande. Pliez le matelas au milieu et placez-le de manière que les trois disques inférieurs soient placés à l'ouverture des trois trous de la partie jambe. Il est important qu'il y ait un disque en nylon sur le dessus et le dessous de la plaque métallique. Tirez ensuite le matelas vers le pied de manière que les trois disques glissent jusqu'au fond des trous. Mettez le plan de couchage complètement à l'horizontale à l'aide de la télécommande

Poussez le disque au milieu de la face inférieure du matelas principal dans le trou du plan de couchage. Il est important qu'il y ait un disque en nylon sur le dessus et le dessous de la plaque métallique. Ceci est assuré en appuyant sur le matelas principal tout en le tirant sur le côté. Les deux disques sur le matelas de pied sont enfoncés dans les deux trous ronds du plan de couchage de la partie pieds.

Remarque: RotoBed®Change ne doit pas être utilisé par des personnes sans introduction dans l'utilisation du lit. RotoBed®Change doit être utilisé exclusivement avec la télécommande. Le lit est testé selon les dernières normes et règles applicables pour les lits de soins. Sachez que ni les enfants ni les animaux ne sont sous le lit lorsque les pièces du lit sont fixées. Lorsque la jambe est soulevée, ne la surchargez pas d'objets lourds ou de personnes.