



Montage de RotoBed® Underbed Light

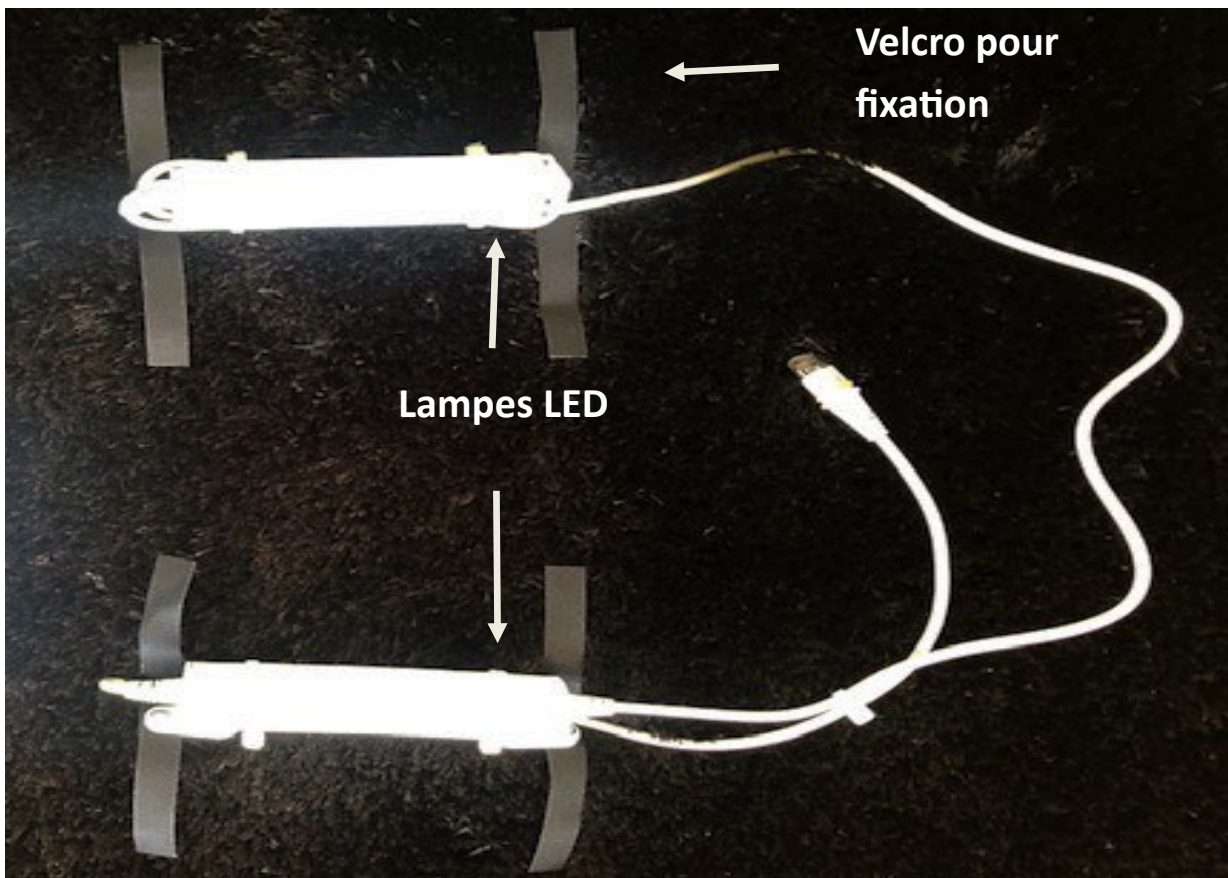


Commencez par retirer le matelas. Déplacez le lit en position de sortie et soulevez la partie jambe au plus haut possible. Vous êtes maintenant prêt à monter.

1. Enlevez le couvercle de la boîte de Signal:


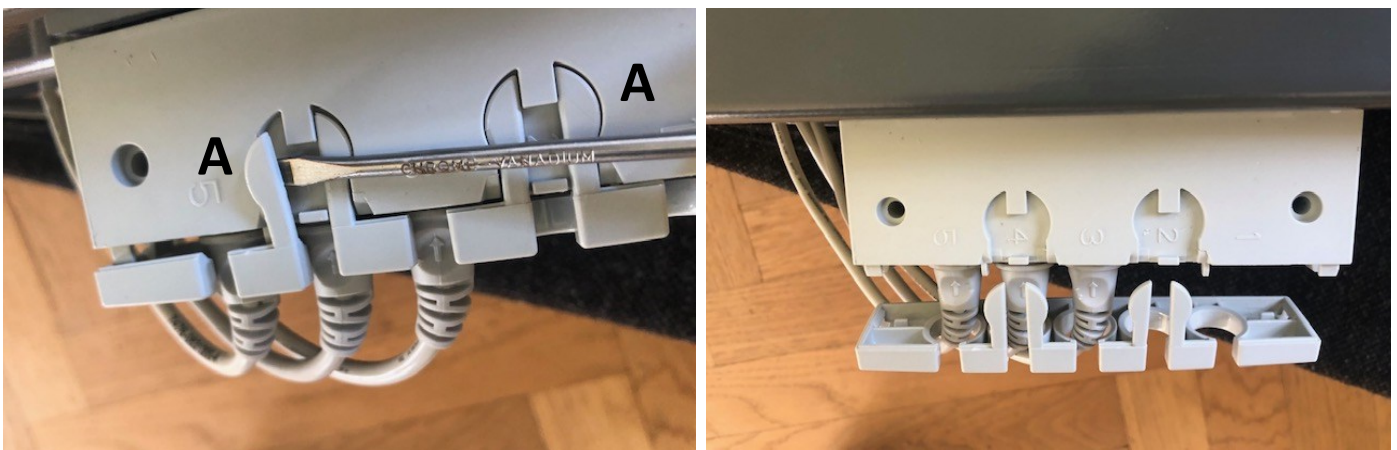


1.a)) Utilisez un tournevis plat ou similaire. Remuez pour ouvrir les petites broches en plastique des deux côtés (A) et retirez le couvercle. La boîte de Signal est maintenant prête à installer le nouveau câble de la lampe LED.

2. Montage des lampes LED:

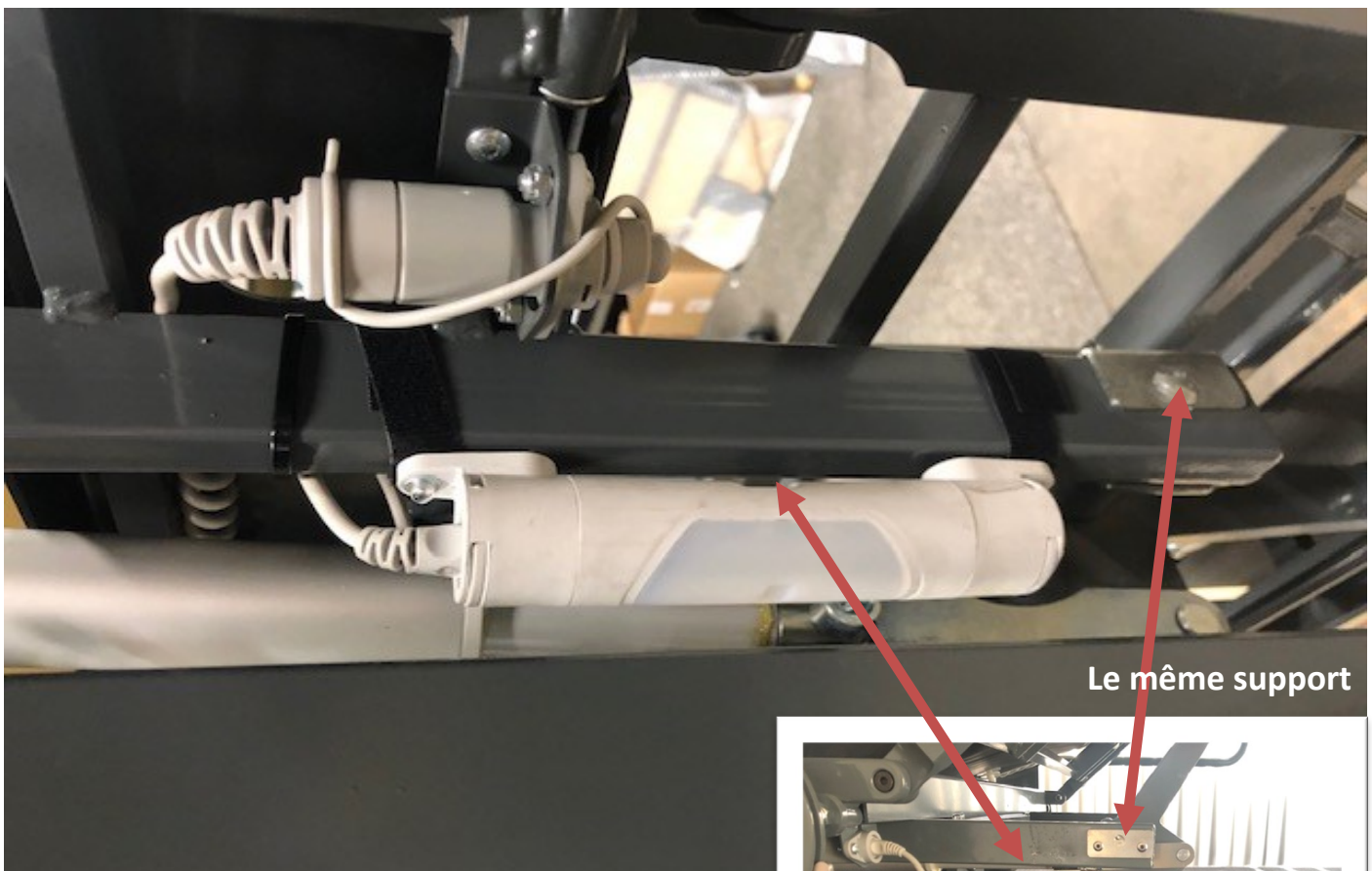

2.a) Utilisez les bandes velcro pour fixer les lampes LED sur le cadre du lit sous la partie jambe des deux côtés du lit.

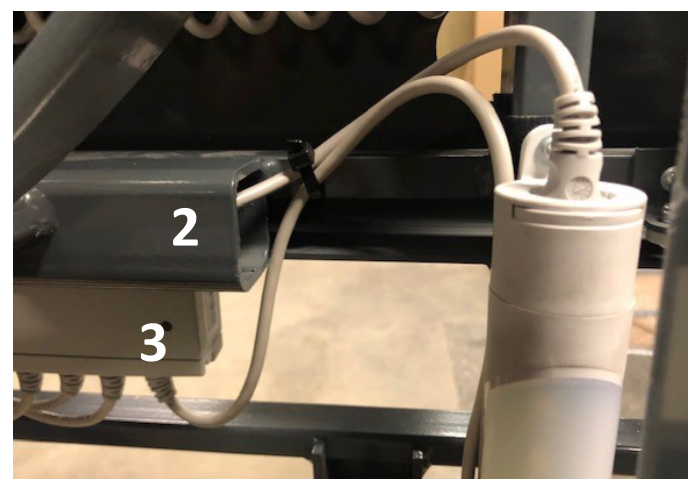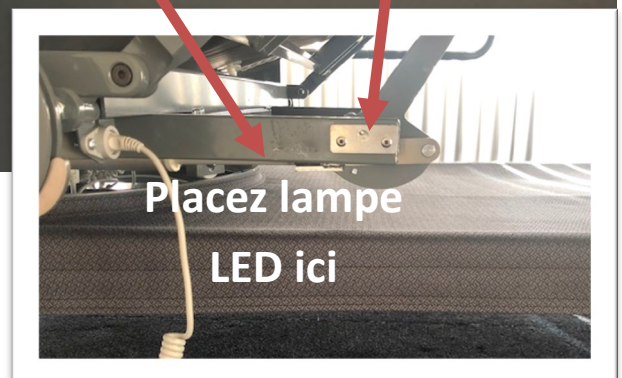

2.b) Prenez le câble long (1) connecté à l'une des lampes LED et placez-le à l'intérieur du tube (2) et connectez-le à l'autre lampe LED. Le câble court de la lampe LED no. 2 doit être branché dans la boîte de signal. (3)