


Montage de la table de chevet RotoBed® Bedside Table

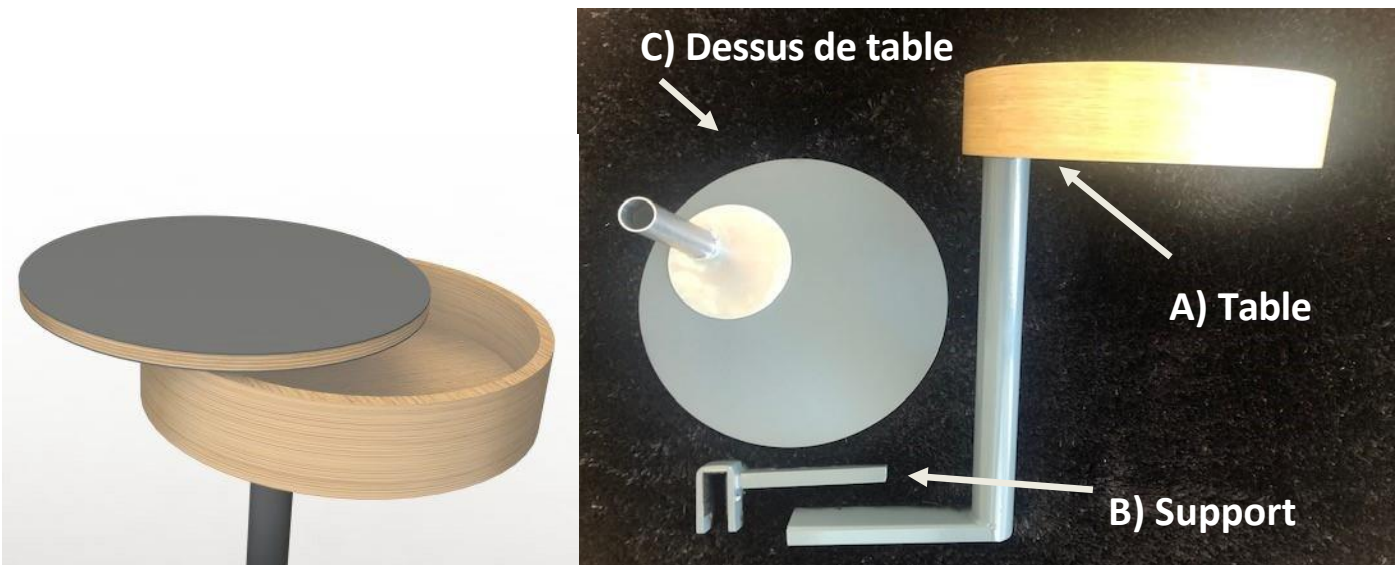

1. Déplacez le lit en position de sortie. Maintenant, levez la partie de la jambe au plus haut possible.

2.1


Si le lit a des barrières de lit en bois: Poussez le support (B) dans l'extrémité de la table (A). Laissez 2 trous de vis visibles. Serrez les 2 vis avec la clé Allen.



2.2


Si le lit a des barrières de lit en metal: Poussez le support (B) à fond dans l'extrémité de la table (A). Serrez les 2 vis avec la clé Allen.



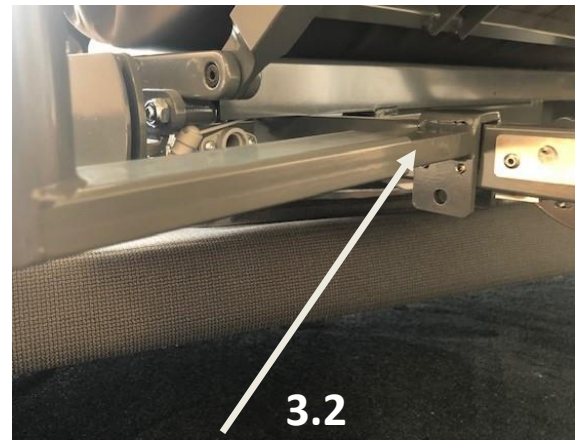


3. Placez le support (B) sous la partie jambe et au-dessus du cadre de lit avec l'ouverture horizontale (3.1).

Puis tournez et placez le support sur le cadre de lit (3.2).

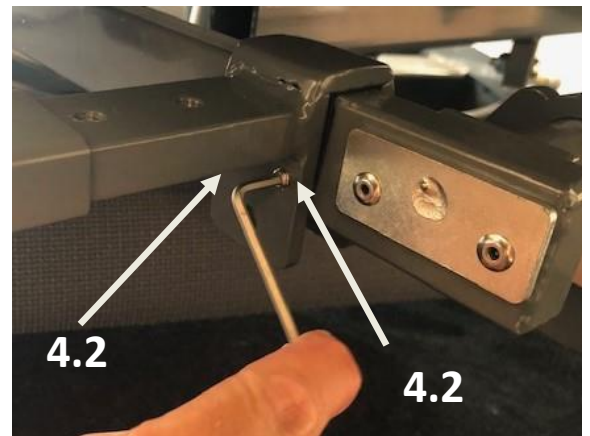

4. Serrez la plus grosse vis en dessous (4.1) jusqu'à ce que la table soit stable et verticale. Maintenant, serrez les 2 petites vis(4.2).

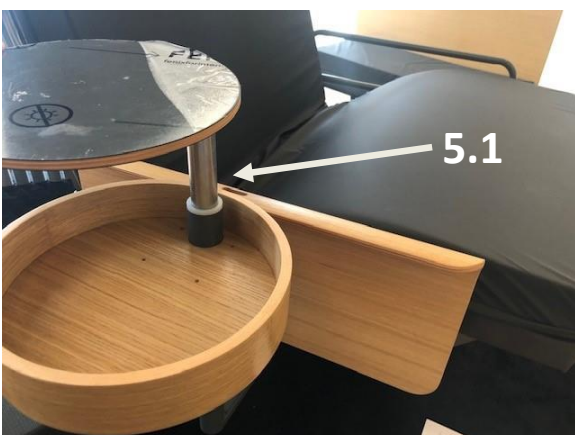

5. Insérez le dessus de table (C) dans la table (5.1) et retirez la feuille de protection(5.2). La table est maintenant prête à être utilisée.

Attention!

Votre lit a-t-il des barrières en bois?

RotoBed® est programmé pour tourner vers une position de sortie oblique. Si vous choisissez de changer cela en faveur d'une sortie perpendiculaire, tenez compte des points suivants:
Si votre lit a des barrières de lit en bois au milieu, la table de chevet ne peut PAS être montée du même côté que le lit tourne.
Cela ferait entrer la table en collision avec la tête de lit (voir photo ci-dessous).

Les alternatives sont:

- A. Montez la table de chevet de l'autre côté du lit.
- B. Retirez la barrière de ce côté. Vous pouvez maintenant monter la table plus près du lit (suivez les instructions 2.2 à la page 1)

Attention!

La table entrera en collision avec la tête de lit si le lit tourne vers une sortie perpendiculaire.

