


## RotoBed® LED Lamp

EN: Mounting of bedside lamp  
DK: Montering af sengelampe

FR: Montage de la lampe de chevet  
DE: Montage der Nachttischlampe

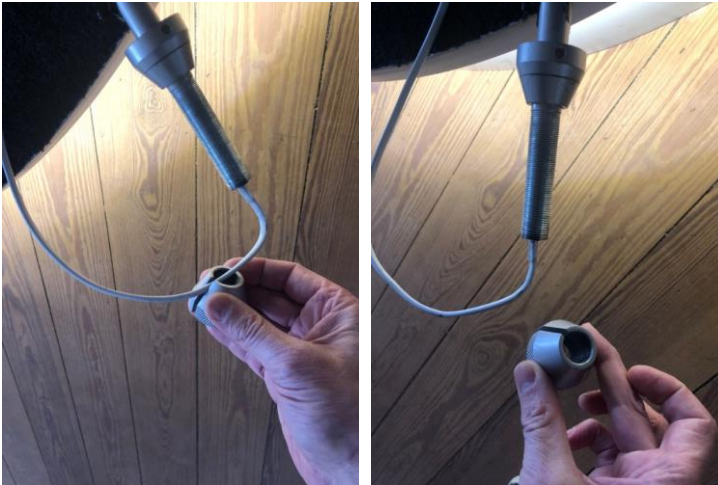

EN: Remove the conical bracket at the end of the lamp.

FR: Retirez le support conique à l'extrémité de la lampe.

DK: Afmonter det koniske beslag i bunden af lampestangen

DE: Entfernen Sie die konische Halterung am Ende der Lampe.



EN: Route the cable through one of the holders at the head end.

FR: Faites passer le câble à travers l'un des supports à la tête.

DK: Træk kablet igennem en af holderne ved hovedenden.

DE: Führen Sie das Kabel durch einen der Halter am Kopfende.



EN: Tighten the conical bracket from the underside of the holder and connect the power supply.

FR: Serrez le support conique de la face inférieure du support et connectez l'alimentation électrique.

DK: Spænd det koniske beslag fast fra holderens underside og slut strømmen til.

DE: Ziehen Sie die konische Halterung von der Unterseite des Halters an. Schließen Sie die Stromversorgung.